

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04495 от
19.03.2009г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.

Изготовитель:
ООО «СибОрто», Россия

Общество с ограниченной ответственностью «СибОрто»
(ООО «СибОрто»)

Памятка по пользованию

Бандаж дородовый БН2-Т

625026, г. Тюмень,
ул. Республики, д.148, к.1/2
телефон: (3452) 51-47-07, 34-95-34

Бандаж дородовый БН2-Т осуществляет поддержку живота, способствуя нормализации положения плода, снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника за счет фиксации поясничной области при помощи ребер жесткости, уменьшает дискомфорт и боли в спине. Способствует снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи и появлению "растяжек" живота, особенно при многоводии, многоплодии.

Показания к применению:

- поддержка живота во 2-ой и 3-й триместры беременности на фоне заболеваний позвоночника;
- снижение нагрузки на поясничный отдел позвоночника во время беременности;
- уменьшение и предупреждение возникновения болей в спине;
- немедикаментозное лечение радикулитов и люмбаго, возникших во время беременности;
- профилактика осложнений на фоне беременности (обеспечение нормального положения плода, снижение давления на органы малого таза и др.);
- многоводие, многоплодие;
- гипертонус матки;
- профилактика перерастяжения мышц и кожи живота, образования стрий (растяжек).

Противопоказания:

- невралимые грыжи передней брюшной стенки;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Правила пользования:

Бандаж рекомендуется надевать на хлопчатобумажное белье в положении лежа на спине. Пояс бандажа расположить в лобковой области, под животом, и застегнуть с помощью застежки-липучки «Велкро». Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Рекомендованный режим ношения: в течение всего дня. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки обычными моющими средствами. Сушить не отжимая, в расправленном виде вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Гарантия:

6 месяцев с момента приобретения.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.