

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04498 от
19.03.2009г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.

Общество с ограниченной ответственностью «СибОрто»
(ООО «СибОрто»)

Изготовитель:
ООО «СибОрто», Россия

Памятка по пользованию

Бандаж грыжевой БН0-Т

625026, г. Тюмень,
ул. Республики, д.148, к.1/2
телефон: (3452) 51-47-07, 34-95-34

Бандаж при пупочной грыже БН0-Т-01 представляет собой эластичный пояс, который фиксируется с помощью застежки-липучки «Велкро» на животе так, чтобы полужесткий пелот располагался в области пупка. Применяется для консервативного лечения пупочных грыж, защиты от ущемления и прогрессирования грыжи.

Бандаж при пупочной грыже детский БН0-Т-02 представляет собой эластичный пояс, который фиксируется с помощью застежки-липучки «Велкро» на животике ребенка так, чтобы полужесткий пелот располагался в области пупка. Применяется для консервативного лечения пупочных грыж у детей до 3-лет, защиты от ущемления и прогрессирования грыжи.

Бандаж при паховой грыже односторонний БН0-Т-03 представляет собой эластичный пояс с одним (правым или левым) несъемным пелотом. Помогает предотвратить ущемление вправимых паховых и бедренных грыж при подъеме тяжестей, кашле, натуживании и иных физических нагрузках; прогрессирование паховых грыж; рецидивы грыж в послеоперационный период.

Бандаж при паховой грыже двусторонний БН0-Т-04 представляет собой эластичный пояс с двумя несъемными пелотами. Помогает предотвратить ущемление вправимых паховых и бедренных грыж при подъеме тяжестей, кашле, натуживании и иных физических нагрузках; прогрессирование паховых грыж; рецидивы грыж в послеоперационный период.

Противопоказания:

- ущемленные и невправляемые грыжи;
- индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Правила пользования:

Бандаж одевается лежа на спине на хлопчатобумажное белье, фиксируется спереди с помощью застежки-липучки велкро.

Степень фиксации и длительность использования определяются лечащим врачом.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Не следует затягивать бандаж слишком сильно во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять.

Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки обычными моющими средствами.

Сушить не отжимая, в расправленном виде вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Гарантия:

6 месяцев с момента приобретения.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.