

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корсета.

Правила пользования:

Корсет одевается на хлопчатобумажное белье в положении лежа на спине, сначала застегивается сам корсет, затем фиксируются боковые тяги. Боковые тяги необходимо заново фиксировать при каждом надевании корсета.

Время ношения корсета определяется лечащим врачом. Если не указано иначе, носить 4 - 6 часов или на момент физической нагрузки.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять.

Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки обычными моющими средствами. Сушить не отжимая, в расправленном виде вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Гарантия:

6 месяцев с момента приобретения.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Изготовитель:

ООО «СибОрто», Россия

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11166 от 16.06.2011г., выдано
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Памятка по пользованию Корсеты ортопедические

625026, г. Тюмень,
ул. Республики, д.148, к.1/2
телефон: (3452) 51-47-07, 34-95-34

Корсеты применяются по назначению врача.

Корсет крестцовый КРО-181 фиксирует крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Применяется при болевом синдроме в крестцовом отделе позвоночника, дисфункции крестцово-подвздошного сочленения, растяжении и перенапряжении капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сочленения, артрозе крестцово-подвздошного сочленения, при болях в области лонного сочленения (дисфункция лобкового симфиза, симфизиолиз, сифмизит), а также для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в крестцовом отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник. Корсет согревает мышцы крестцовой области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет пояснично-крестцовый КРО-182 фиксирует пояснично – крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Применяется при болевом синдроме в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях, растяжении и перенапряжении капсульно-связочного аппарата, миофасциальном болевом синдроме («поясничный миозит»), в период реабилитации после травм и операций, для профилактики травм и заболеваний позвоночника при длительных нагрузках на поясничный отдел позвоночника, связанных с повседневной активностью пациента и для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в поясничном отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет пояснично-крестцовый, усиленный КРО-183 фиксирует пояснично – крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости и пластины. Применяется при болевом синдроме в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях, протрузиях и грыжах межпозвоночных дисков, миофасциальном болевом синдроме («поясничный миозит»), в период реабилитации после травм и операций на поясничном отделе позвоночника, а также для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в поясничном отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет грудопоясничный КРО-184 фиксирует нижний грудной и поясничный отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Применяется при болевом синдроме в нижнегрудном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника, остеохондрозе и других дегенеративных заболеваний, растяжении и перенапряжении капсульно-связочного аппарата, миофасциальном болевом синдроме («поясничный миозит»), в период реабилитации после травм и операций, для профилактики травм и заболеваний позвоночника при длительных нагрузках на нижнегрудной и поясничный отдел позвоночника, связанных с повседневной активностью пациента и для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной областей, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет грудопоясничный, усиленный КРО-185 фиксирует нижний грудной и поясничные отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг, шести ребер жесткости и пластины. Применяется при болевом синдроме в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях, растяжении и перенапряжении капсульно-связочного аппарата, миофасциальном болевом синдроме («поясничный миозит»), в период реабилитации после травм и операций, для профилактики травм и заболеваний позвоночника при длительных нагрузках на поясничный отдел позвоночника, связанных с повседневной активностью пациента и для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет грудопоясничный, с широкой пластиной КРО-186 фиксирует нижний грудной и поясничные отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг, ребер жесткости и широкой пластины из термопластичного материала, которая формируется индивидуально по пациенту. Применяется при болевом синдроме в нижнегрудном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника, остеохондрозе и других дегенеративных заболеваний, растяжении и перенапряжении капсульно-связочного аппарата, миофасциальном болевом синдроме («поясничный миозит»), в период реабилитации после травм и операций, для профилактики травм и заболеваний позвоночника при длительных нагрузках на нижнегрудной и поясничный отдел позвоночника, связанных с повседневной активностью пациента и для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного), после мануальной терапии и лечебной гимнастики. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, стабилизирует позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки.

Корсет реклинующий КРО-187 эластичный стабилизирует грудной отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, на которых крепятся ребра жесткости, и эластичных боковых тяг, которые перекидываются через надплечья и фиксируются на талии, что обеспечивает мягкую реклинацию и разгрузку грудного отдела позвоночника, способствует формированию правильной осанки. Применяется при сутулости, нарушении осанки, искривлении позвоночника в грудном отделе (кифоз, сколиоз), болевом синдроме при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм и операций в области грудного отдела позвоночника, а также для профилактики нарушений осанки при длительных статических нагрузках.

Корсет грудно-пояснично-крестцовый КРО-188 фиксирует грудной и пояснично – крестцовый отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных плечевых и боковых тяг и ребер жесткости. Применяется при нарушениях осанки, искривлениях позвоночника в грудном отделе (кифоз, сколиоз) и поясничном отделе (гиперлордоз), болезни Шейермана-Мау (юношеский кифоз), болевом синдроме при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника, остеопорозе, в период реабилитации после травм и операций в области грудного отдела позвоночника. Корсет обеспечивает стабилизацию грудного отдела позвоночника и грудно-поясничного перехода, помогая больным с выраженным изгибом позвоночника стабилизировать требуемое положение тела, дисциплинирует осанку; обеспечивает стабильную опору и уменьшает вертикальную нагрузку на весь позвоночник, помогая тем самым предупредить и снять боли в вышеуказанных отделах позвоночника, предотвратить травмы во время физической нагрузки.