

**Правила пользования:**

Корсет одевается на х/б белье в положении лежа на спине, сначала застегивается сам корсет, затем фиксируются боковые тяги. Боковые тяги необходимо заново фиксировать при каждом надевании корсета.

Время ношения корсета определяется лечащим врачом. Если не указано иначе, носить 4 - 6 часов или на момент физической нагрузки.

**Стирать** изделие в теплой воде при помощи щетки обычными моющими средствами.

**Сушить** в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

**Не отжимать.**

**Хранить в сухом месте.**

**Гарантия:**

6 месяцев с момента приобретения.

**Изготовитель:**

ООО «СибОрто»

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11166 от 16.06.2011г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Декларация о соответствии № РОСС RU.АГ58.Д02978 (с 16.02.2018г. по 15.02.2021г.), выдана Орган по сертификации продукции ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства"

## Памятка по пользованию

## Корсеты ортопедические

### **Корсеты применяются по назначению врача.**

Корсет крестцовый КРО-181 фиксирует крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Помогает предотвратить и снять боли в крестцовом отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник. Корсет согревает мышцы крестцовой области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также применяется для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет пояснично-крестцовый КРО-182 фиксирует пояснично – крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Помогает предотвратить и снять боли в поясничном отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также применяется для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет пояснично-крестцовый, усиленный КРО-183 фиксирует пояснично – крестцовый отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости и пластины. Помогает предотвратить и снять боли в поясничном отделе позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также применяется для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет грудопоясничный КРО-184 фиксирует нижний грудной и поясничные отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг и шести ребер жесткости. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной областей, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также применяется для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет грудопоясничный, усиленный КРО-185 фиксирует нижний грудной и поясничные отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг, шести ребер жесткости и пластины. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также рекомендуется для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет грудопоясничный, с широкой пластиной КРО-186 фиксирует нижний грудной и поясничные отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных боковых тяг, ребер жесткости и широкой пластины из термопластичного материала, которая формируется индивидуально по пациенту. Помогает предотвратить и снять боли в нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника, уменьшает вертикальную нагрузку на позвоночник, стабилизирует позвоночник, дисциплинирует осанку. Корсет согревает мышцы нижней грудной и поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Он также необходим для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника (сухого или подводного).

Корсет реклинирующий КРО-187 эластичный стабилизирует грудной отдел позвоночника за счет эластичных корсетных лент, на которых крепятся ребра жесткости, и эластичных боковых тяг, которые перекидываются через надплечья и фиксируются на талии, что обеспечивает мягкую реклинацию и разгрузку грудного отдела позвоночника, способствует формированию правильной осанки.

Корсет грудно-пояснично-крестцовый КРО-188 фиксирует грудной и пояснично – крестцовый отделы позвоночника за счет эластичных корсетных лент, эластичных плечевых и боковых тяг и ребер жесткости. Он обеспечивает стабилизацию грудного отдела позвоночника и грудно-поясничного перехода, помогая больным с выраженным изгибом позвоночника стабилизировать требуемое положение тела, дисциплинирует осанку; обеспечивает стабильную опору и уменьшает вертикальную нагрузку на весь позвоночник, помогая тем самым предупредить и снять боли в вышеуказанных отделах позвоночника, предотвратить травмы во время физической нагрузки.

