

Правила пользования:

Бандаж одевается на хлопчатобумажное белье, фиксируется с помощью застежки-липучки «Велкро». При наличии лимфovenозной патологии бандаж одевается на компрессионное белье.

Степень фиксации и длительность использования определяются лечащим врачом.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Не следует затягивать бандаж слишком сильно во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять.

Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки обычными моющими средствами.

Сушить не отжимая, в расправленном виде вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Гарантия:

6 месяцев с момента приобретения.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Изготовитель:

ООО «СибОрто», Россия

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04496 от 19.03.2009г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Памятка по пользованию

Бандаж лечебный БН6-Т

625026, г. Тюмень,
ул. Республики, д.148, к.1/2
телефон: (3452) 51-47-07, 34-95-34

Бандажи лечебные применяются по назначению врача.

Бандаж на коленный сустав БН6-Т-01 обеспечивает фиксацию (иммобилизацию) коленного сустава в положении разгибания, исключая возможность движений. Фиксация достигается за счет металлических шин и манжет с ремнями застежками "Велкро". Бандаж применяется при острых травмах коленного сустава, для иммобилизации после операций на коленном суставе, в период ранней реабилитации после снятия гипсовой повязки, при гемартрозе, остром артрите, а также для профилактики патологической установки нижней конечности при умеренном вальгусном или варусном отклонении голени и для профилактики развития сгибательной контрактуры коленного сустава, в том числе при ДЦП, СМА и spina bifida.

Бандаж на шейный отдел позвоночника типа Шанца БН6-Т-02 ограничивает подвижность и фиксирует положение головы и шеи таким образом, что нагрузка на мышцы снижается, тем самым уменьшается напряжение мышечных групп шеи и надплечья, улучшая кровообращения головы и шеи. Фиксация достигается за счет пенополиуретана повышенной упругости (ППУ) и застежки-липучки «Велкро». Бандаж применяется при болях в шейном отделе, шейном миозите, комплексном лечении головной боли, в период реабилитации после травм и операций, после инсультов.

Бандаж лечебный на голеностопный сустав БН6-Т-03 обеспечивает фиксацию и компрессию голеностопного сустава и применяется при частичных повреждениях связок, воспалительных заболеваниях, а также для профилактики травм при занятиях спортом и физических нагрузках. Фиксируется на голеностопном суставе по принципу «восьмерки» с помощью застежки-липучки «Велкро».

Бандаж на шейный отдел позвоночника типа Шанца детский БН6-Т-04 ограничивает подвижность и фиксирует положение головы и шеи ребенка таким образом, что нагрузка на мышцы снижается, тем самым уменьшается напряжение мышечных групп шеи и надплечья, улучшая кровообращения головы и шеи. Бандаж применяется при мышечной кривошее, после травмы шейного отдела позвоночника при родах, нарушении тонуса мышц шеи, а также для поддержки шейного отдела позвоночника у ослабленных и недоношенных детей.

Бандаж на брюшную стенку БН6-Т-05, БН6-Т-06, БН6-Т-07, БН6-Т-08, БН6-Т-09 обеспечивает фиксацию и поддержку передней брюшной стенки за счёт нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и натяжения эластичного материала, опоясывающего туловище. Способствует образованию послеоперационного рубца, за счет защиты и разгрузки соединительно-тканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки. Бандаж применяется после операций на органах брюшной стенки, включая кесарево сечение, в период восстановления после нормальных родов, в качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, почек, при ожирении 3-4 степени, после пластических операций, а также для профилактики образования и ущемления послеоперационных грыж передней брюшной стенки, грыж белой линии живота, пупочных грыж.

Бандаж на лучезапястный сустав БН6-Т-10 ограничивает подвижность и обеспечивает фиксацию лучезапястного сустава, способствует снижению болевого синдрома за счет манжеты, металлической шины и ремня-фиксатора с застежкой «Велкро». Подходит как для левой, так и для правой руки. Бандаж применяется при повреждениях связок и сухожилий, травмах и после операций на лучезапястном суставе, нестабильности сустава, туннельном синдроме, хронических заболеваниях (артрозы, артриты ревматического происхождения), а также для профилактики сгибательной контрактуры кисти.

Бандаж на верхнюю конечность-косынка БН6-Т-13 обеспечивает фиксацию и разгрузку суставов верхней конечности и оптимизирует положение руки после ушибов, вывихов и переломов, частичных повреждениях связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава. Бандаж также применяется для поддержания руки при острых и хронических воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты), при парезах и параличах верхней конечности (руки).

Бандаж на коленный сустав БН6-Т-15 стабилизирует коленный сустав в период воспалительного заболевания (артриты, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), при травме, после оперативного лечения, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав. Также бандаж применяется для профилактики обострений (особенно сезонных) воспалительно-дегенеративных заболеваний коленного сустава и профилактики травм при занятиях спортом и физическим трудом.

Бандаж на локтевой сустав БН6-Т-16 обеспечивает фиксацию (иммобилизацию) локтевого сустава в положении разгибания, исключая подвижность сустава. Фиксация достигается за счет металлических шин и манжет с ремнями застежками "Велкро". Применяется при лечении и реабилитации после тяжелых травм локтевого сустава (внутрисуставных переломов, кровоизлияний в сустав, повреждениях капсульно-связочного аппарата, при умеренно выраженной нестабильности сустава), в период ранней реабилитации после снятия гипсовой повязки.

Бандаж на верхнюю конечность БН6-Т-17 применяется для иммобилизации плечевого сустава и верхней конечности при ушибах, вывихах, переломах, парезах и параличах, острых и хронических воспалительных заболеваниях (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные артриты). В зависимости от сборки бандажа (с фиксацией к туловищу или без) оказывает поддержку руки или поддержку руки с фиксацией к туловищу.

Бандаж тазобедренный БН6-Т-18 обеспечивает фиксацию и стабилизацию тазобедренного сустава в период реабилитации после операций, вправлений, вывихов бедра, повреждений связочно-мышечного аппарата. Бандаж легко надевается и фиксируется за счет застежек-липучек «Велкро». Подходит как для левой, так и для правой ноги.

Бандаж стопы лечебный при НУ БН6-Т-19 возвращает кости стопы в анатомически правильное положение. Благодаря наличию упругого пелота бережно и надежно поддерживает нормальную арочную форму стопы. При постоянном использовании бандажа уменьшается утомляемость стоп при ходьбе, чувство усталости и боли при плоскостопии и Hallux Valgus («косточки» на ногах). Бандаж предназначен для многоразового применения в широкой повседневной обуви.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.